



SELBSTTEST-GEBRAUCHSANWEISUNG (JOYSBIO)




1. Führen Sie die gesamte weiche Spitze des Stäbchens vorsichtig in das Nasenloch ein, ca. 2,5 Zentimeter. Drehen Sie das Stäbchen 5-mal gegen die Innenwand ihres Nasenlochs für ca. 15 Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem gleichen Tupfer im anderen Nasenloch.



6. Lagerhinweis: Lagern Sie den Test bei 2 °C bis höchsten 30 °C und bringen Sie den Testkit vor Durchführung auf Raumtemperatur.



2. Öffnen Sie die das Röhrchen mit der Flüssigkeit und tauchen Sie das Stäbchen in der Flüssigkeit mindestens 20 Sekunden auf und ab. Halten Sie dann das Stäbchen gegen den Boden des Röhrchens und drehen Sie das Stäbchen 5-mal in der Flüssigkeit.

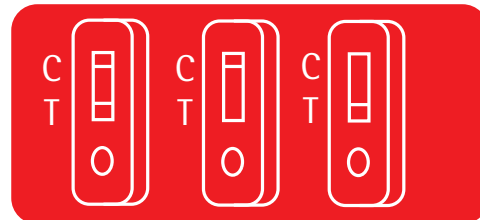

Positiv Negativ Ungültig



3. Drücken Sie das Röhrchen im Bereich des Stäbchenkopfes fest zusammen und ziehen Sie das Stäbchen heraus damit die Flüssigkeit im Röhrchen bleibt. Anschließend mit beiliegender Verschlusskappe verschließen.



Röhrchen/Extraktionspuffer



4. Nehmen Sie die Testkassette und legen Sie diese auf eine saubere ebene Oberfläche. Geben Sie 3 Tropfen der Probe senkrecht in das kleinere Probenloch.



Stäbchen/Tupfer



5. Lesen Sie das Ergebnis nach 15 bis 20 Minuten ab. Lesen Sie das Testergebnis nach 20 Minuten nicht mehr ab.



Testkassette



Weitere Informationen zur COVID-19 Erkrankung erhalten Sie unter:

Land Vorarlberg: www.vorarlberg.at/corona
Bundesministerium: www.sozialministerium.at